

BASSIN ET URINAL MASCULIN

Pour le prélèvement de fluides biologiques humains (urine et fèces). Nettoyer et désinfecter avant utilisation.

Non stérilisé. Le produit n'est pas fabriqué en latex de caoutchouc naturel ou en caoutchouc naturel séché.

Dispositif médical.












Destination du produit :

Le bassin de lit est destiné à la collecte d'urine et/ou de matières fécales chez les patients alités ou à mobilité réduite. Le urinal masculin est destiné à la collecte d'urine chez les patients masculins alités. La bassine et le urinal masculin sont destinés à un usage hospitalier et/ou domestique.

Précautions générales :

1. Ne convient pas à d'autres applications que celles pour lesquelles il a été conçu.
2. L'utilisation du bassin et du urinal masculin ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs finaux prévus.
3. Ne pas utiliser le bassin ou le urinal masculin si l'emballage est endommagé.
4. Il doit être nettoyé avec un détergent et désinfecté avec de l'eau de Javel ou d'autres désinfectants, avant chaque utilisation. Le bassin peut être utilisé dans les machines à laver.
5. La durée de vie du bassin est déterminée par l'usure et la détérioration dues à l'utilisation. Le jeter lorsque vous détectez des changements de couleur, des rugosités, des déformations, etc.
6. Stocker à l'écart des sources de chaleur.

Glossaire des symboles :

 REF	Référence du catalogue	 LOT	Référence du lot	 Date limite d'utilisation
 MD	Dispositif Médical	 QTY	Quantité	 Marquage CE
	Tenir à l'écart du soleil		Fabricant	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
 UDI	Identifiant unique des dispositifs		Consulter les instructions sur le site web www.deltalab.es	

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.