

FIOLE COLECTARE SÂNGE EUROTUBO®

Fiolele sunt fabricate din polipropilenă transparentă, rezistentă la impact. Capacul este realizat din polietilenă. Designul său ergonomic permite îndepărtarea confortabilă a capacului cu o singură mână. Numărul de referință și de lot, precum și data de expirare sunt tipărite pe eticheta fiolei pentru a asigura trasabilitatea produselor.

După extragerea sângelui, acesta este introdus în fiola de colectare corespunzătoare, în funcție de analiză: SER sau PLASMĂ.

Fiole pentru SER:

Aceste fiole sunt furnizate cu aditivi pentru accelerarea coagulării, disponibili sub formă de gel sau granule, în funcție de model.

Indicații de utilizare:

- Îndepărtați capacul.
- Introduceți mostra de sânge în fiolă. Unele teste, precum cele pentru glucoză, necesită un anumit volum de sânge; umpleți aceste fiole până la linia de nivel de umplere tipărită pe etichetă.
- Puneți la loc capacul fiolei și agitați conținutul întorcând ușor fiola de 4 până la 6 ori.
- Așezați fiola în poziție verticală și lăsați 15 minute pentru a asigura o coagulare adecvată.
- Centrifugați fiola la 1.500 xg timp de 15 minute.

Fiole pentru PLASMĂ:

Fiolele pentru plasmă sunt furnizate cu diverși aditivi specifici pentru analiza dorită. Sunt disponibili următorii aditivi: Heparină de litiu, heparină iodoacetat (ideală pentru testele de glucoză), citrat de sodiu, EDTA dipotasic și tripotasic și citrat de sodiu. Aceste fiole (cu excepția fiolelor cu citrat) includ un aditiv sub formă de spray pentru a ajuta amestecarea cu sângele. Fiolele cu citrat sunt fabricate cu anticoagulant lichid, în conformitate cu procedurile standard.

Indicații de utilizare:

- Îndepărtați capacul.
- Introduceți mostra de sânge în fiolă și umpleți până la linia de nivel de umplere tipărită pe etichetă.
- Puneți la loc capacul fiolei și agitați conținutul întorcând ușor fiola de 4 până la 6 ori.
- Sângele integral poate fi analizat imediat. Pentru analiza plasmei se recomandă un timp de așteptare de câteva minute sau rotirea ușoară a fiolei.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați catalogul general. Sunt disponibile informații detaliate despre fiecare fiolă în parte.

Depozitați fiolele departe de lumina soarelui, într-o zonă bine ventilată și ferite de surse de căldură sau aprindere. Evitați temperaturile extreme. A nu se folosi dacă produsul și-a schimbat culoarea originală.

A nu se utiliza dacă prezintă murdărie vizibilă. A nu se utiliza dacă s-a depășit perioada de valabilitate. A nu se folosi dacă este crăpată sau lipsesc componente.

Eliminare ca deșeu ecologic. La modelele cu GEL, conținutul fiolei (sânge + aditiv) NU TREBUIE reinfuzat în corpul uman.

Glosar de simboluri:



Perioada de valabilitate



No reutilizar



Cantitate



Cod lot



Număr catalog



Marcaj CE



Diagnostic in vitro



Consultați instrucțiunile de utilizare pe website-ul www.deltalab.es/eifus



Producător

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario.
*Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.