

## RECIPIENTE PER RACCOLTA DI CAMPIONI

Per il prelievo, la conservazione e il trasporto di campioni clinici umani in vista della successiva analisi.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso del prodotto prima dell'uso.

Prodotto monouso. Non sterilizzato.

Il prodotto non è fabbricato con lattice di gomma naturale o gomma naturale secca.

Prodotto sanitario per diagnosi In Vitro.


### Uso previsto:

Recipiente per raccolta dei campioni (flaconi, provette o set) progettato per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni clinici umani (quali urina, espettorato, feci, ecc.). Il prodotto è progettato in modo tale che, a seconda del metodo, il paziente o altro utente predeterminato prelevi il campione in base alle istruzioni fornite dal medico o dal laboratorio.

### Precauzioni generali:


- Non adatto per qualsiasi applicazione diversa dall'uso previsto.
- Non serrare o premere il recipiente.
- Non utilizzare se il prodotto o qualcuno dei suoi componenti sono danneggiati.
- Non riutilizzare il prodotto. Il riutilizzo di questo prodotto può influire sulla successiva analisi del campione prelevato.
- Tenere al riparo dalla luce del sole.

### Precauzioni particolari:

 Gli operatori sanitari devono convalidare l'uso del contenitore per le loro combinazioni specifiche di strumenti di analisi e sistema di reagenti, e per le condizioni di conservazione dei campioni.

### Istruzioni per il paziente

1. Lavarsi accuratamente le mani e asciugarsi con carta assorbente.
2. Rimuovere il coperchio dal recipiente (se del caso) e collocarlo rivolto verso l'alto su una superficie piana, onde evitare che la parte interna del coperchio tocchi alcunché, evitandone la contaminazione.
3. Raccogliere il campione seguendo le istruzioni della struttura/medico, tenendo conto delle considerazioni di preparazione previamente indicate.
4. Depositare il campione direttamente nel recipiente e rimettere a posto il coperchio (se del caso) per evitare la contaminazione. In caso di set, riempire il tubo ed eliminare il resto delle urine e il contenitore di raccolta. Posizionare il tappo sul tubo premendo per evitare possibili perdite future.
5. Dopo il flaconi o provette del campione, restituire il recipiente all'operatore sanitario.

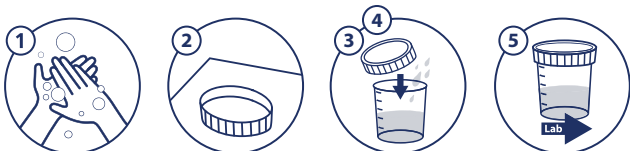

### Istruzioni per il trasporto del campione:

1. Tutti i recipienti, con campioni o utilizzati, devono essere classificati come a rischio biologico ai fini di manipolazione e smaltimento. È responsabilità di ogni laboratorio manipolare, trattare e smaltire i rifiuti in conformità alla legislazione vigente. I recipienti non utilizzati possono essere considerati non pericolosi e possono essere smaltiti in base a questo criterio.

2. Assicurarsi che i contenitori siano etichettati correttamente con il nome del paziente, l'identificatore, la data e l'ora di prelievo del paziente e qualsiasi ulteriore informazione richiesta dalla politica della struttura sanitaria.

3. Etichettare e imballare correttamente qualsiasi recipiente utilizzato per il trasporto del campione in altro luogo, in conformità alle normative locali e statali corrispondenti.

### Istruzioni per il trattamento dei campioni:

1. Attenersi alle precauzioni standard durante l'analisi del campione: indossare guanti, camici da laboratorio, protezioni per gli occhi o altri dispositivi di protezione personale per proteggersi da possibili schizzi o perdite di campioni o da possibili esposizioni ad agenti patogeni.
2. Trattare il campione in base ai protocolli stabiliti dalla struttura/laboratorio.
3. Smaltire i contenitori per la raccolta di campioni in base ai protocolli di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico della struttura/laboratorio.



### Bibliografia:

1. Nickander, K et al. Urine culture transport tubes: effect of sample volume on bacterial toxicity of the preservative. J Clin Microbiol. 1982, 15(4):593.
2. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), Urinalysis - Approved Guideline – Third Edition, GP16-A3, Wayne, PA, 2009.
3. Cabedo C, et al. ¿Es importante la técnica de recogida de la orina para evitar la contaminación de las muestras?. Aten Primaria 2004;33(3):140-4. 2003.

### Glossario dei simboli:

 REF	Numero di catalogo	 LOT	Codice lotto	 <a href="http://www.deltalab.es">www.deltalab.es</a>	Fare riferimento alle istruzioni d'uso sul sito web <a href="http://www.deltalab.es/eifus">www.deltalab.es/eifus</a>	 QTY	Quantità
 IVD	Dispositif Médical pour Diagnostic In Vitro		Non riutilizzare		Non utilizzare se il contenitore è danneggiato		Precauzioni
	Mantenere al riparo dalla luce del sole		Produttore		Data di scadenza		Marcatura CE

In caso di incidente grave\* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente.

\*Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.