

BG

ШПАТУЛА (ДЕПРЕСОР) ЗА ЕЗИК

Продукт за еднократна употреба. Повторната употреба на този продукт може да причини инфекции. Стерилизиран с етиленов оксид. Изработен от два вида материал:

-Нетоксичен и биосъвместим дървен материал, с нечуплива консистенция и заоблени ръбове за предотвратяване на наранявания в устната кухина.















-Пластмаса (полистирол) нетоксична, биосъвместима и със заоблени ръбове, за да се избегнат наранявания в устната кухина.

С достатъчна механична консистенция, за да се гарантира невъзможността за счупване по време на употреба. Използва се като депресор на езика за постигане на правилна визуализация на устната кухина и за предотвратяване на замърсяване по време на вземане на проби от гърлото и назофаринкса. Опаковка: индивидуално опаковани.

Шпатулата (депресорът) е предназначена за употреба в клинично-болнични условия. Употребата на шпатулата (депресора) не създава затруднения за целевите потребители. Продуктът не е подходящ за друго приложение освен предназначението му. Не трябва да се използва, ако има признаци на счупване, повреждане или влошаване на качеството на опаковката. При нарушена цялост на опаковката, не използвайте шпатулата (депресора), не се гарантира стерилността. Не трябва да се използва, ако се има замърсяване на продукта. Изхвърлете продукта, ако бъдат открити пукнатини или стъркотини. Не използвайте, ако отпечатаната информация за продукта не се показва правилно. Не използвайте след изтичане на срока на годност.


Макар и малко вероятно, прилагането на твърде силен натиск по време на употреба може да счупи шпатулата (депресора). В случай на счупване, изхвърлете незабавно. Шпатулите не изискват специални условия на съхранение. Поради предназначението на продукта, крайните потребители принадлежат към здравния сектор, в който се използват контейнери за биологични отпадъци, където използваният продукт трябва да се изхвърля и управлява като биологичен отпадък. След употреба шпатулите (депресорите) трябва да бъдат обеззаразени или третирани като замърсени болнични отпадъци. Отговорност на всяка лаборатория е да борави, обработва и изхвърля отпадъците в съответствие с Националните разпоредбите. Неизползваните шпатули (депресори) могат да се считат за неопасни продукти и могат да бъдат изхвърлени въз основа на този критерий.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 Количество	 CE маркировка	 Партиден номер	 Създател
 каталожна справка	 Не използвайте, ако опаковката е повредена	 не използвайте повторно	 Стерилен с етиленов оксид
 Медицинско изделие	 Вижте инструкциите за употреба на уебсайта www.deltalab.es/eifus	 Дата на производство	 Срок на годност
 уникален идентификатор на устройството	 Уникална стерилна бариерна система		

В случай на сериозен инцидент*, свързан с продукта, уведомете както Deltalab, S.L, така и компетентния орган на държавата, в която е установен потребителят. *Под „сериозен инцидент“ се разбира инцидент, който води до смърт или сериозно влошаване на здравето на пациента или потребителя или сериозна заплаха за общественото здраве.



 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es