

DE

HOLZMUNDSPATEL

Einwegprodukt. Die Wiederverwendung dieses Produkts kann Infektionen verursachen. Steril durch Ethylenoxid. Sie werden in zwei Materialien verkauft:











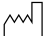



- Ungiftiges und biokompatibles Holz, mit bruchsicherer Konsistenz und abgerundeten Kanten, um Aggressionen im Mundbereich zu verhindern.
- Kunststoff (Polystyrol) ungiftig, biokompatibel und mit abgerundeten Kanten, um Aggressionen im Mundbereich zu vermeiden.

Es hat eine ausreichende mechanische Konsistenz, um sicherzustellen, dass es während des Gebrauchs nicht bricht. Es wird als Zungenspatel verwendet, um eine korrekte Visualisierung des Mundbereichs zu erreichen und eine Kontamination während der Probenahme aus Rachen und Nasopharynx zu verhindern. Einheitliche Aufmachung: einzeln verpackt im Flowpack.


Der Holzmundspatel ist für die Verwendung in klinischen Krankenhäusern vorgesehen. Die Anwendung des Holzmundspatel bereitet den beabsichtigten Anwendern keine Schwierigkeiten. Nicht für andere Anwendungen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Er sollte nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Bruch oder Beschädigung der Verpackung gibt. Wenn festgestellt wird, dass die Verpackung beschädigt ist, verwenden Sie den Holzmundspatel, da die Sterilität nicht garantiert ist. Er sollte nicht verwendet werden, wenn eine Verschmutzung festgestellt wird. Entsorgen Sie das Produkt, wenn Risse oder Absplittierungen gefunden werden. Nicht verwenden, wenn die aufgedruckte Produktinformation nicht korrekt angezeigt wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Obwohl es unwahrscheinlich ist, kann das Ausüben von zu viel Druck während des Gebrauchs den Holzmundspatel beschädigen. Bei Bruch sofort entsorgen. Das Produkt erfordert keine besonderen Lagerbedingungen. Aufgrund der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts gehen die Empfänger dem Gesundheitssektor an und verfügen über Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, in denen das gebrauchte Produkt entsorgt werden muss. Einmal verwendete Holzmundspatel müssen dekontaminiert oder als kontaminierter Krankenhausabfall behandelt werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfälle gemäß den Vorschriften zu handhaben, zu behandeln und zu entsorgen. Unbenutzte Holzmundspatel können als ungefährliche Produkte angesehen werden und können auf der Grundlage dieser Kriterien entsorgt werden.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 Menge	 CE Kennzeichnung	 Chargennummer	 Hersteller
 Katalog Referenz	 Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	 Nicht wiederverwenden	 Steril durch Ethylenoxid
 Medizinisches Gerät	 Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung auf der www.deltalab.es/eifus	 Herstellungsdatum	 Gültig bis
 Eindeutige Gerätekennung	 Einzigartiges Sterilbarriersystem		

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls* im Zusammenhang mit dem Produkt benachrichtigen Sie sowohl Deltalab, SL als auch die zuständige Behörde des Staates, in dem der Benutzer niedergelassen ist. *Ein „schwerer Vorfall“ ist ein solcher, der den Tod oder eine ernsthafte Verschlechterung der Gesundheit des Patienten oder Benutzers zur Folge hat oder eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt.

DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es