

es

DEPRESOR LINGUAL















Producto de un solo uso. La reutilización de este producto puede causar infecciones. Estéril por óxido de etileno. Se comercializan en dos materiales:
- Madera atóxica y biocompatible, de consistencia inastillable y de bordes redondeados para evitar agresiones en la zona bucal.
- Plástico (poliestireno) atóxico, biocompatible y de bordes redondeados para evitar agresiones en la zona bucal.

Tiene una consistencia mecánica suficiente para asegurar la imposibilidad de rotura durante su uso. Se utiliza como depresor de la lengua para conseguir una correcta visualización de la zona bucal y para prevenir las contaminaciones durante la toma de muestras de garganta y nasofaringe. Presentación unitaria: embolsados unitariamente en flow-pack.


El depresor está destinado a ser utilizado en entornos clínico-hospitalarios. El uso del depresor no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe usarse si hay signos de rotura o deterioro del envase. Si se observa que el envase unitario ha perdido su integridad, no utilizar el depresor ya que no tiene garantía de esterilidad. No debe usarse si se observa suciedad en el depresor. Desechar el producto si se encuentra alguno roto o con astillas. No usar si la información impresa del producto no se visualiza correctamente. No usar después de la fecha de caducidad.

Aunque es poco probable, ejercer una presión demasiado fuerte durante su uso podría romper el depresor. En caso de rotura, desechar inmediatamente. Los depresores no precisan de condiciones especiales de conservación. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario y disponen de contenedores de residuos biológicos, donde se debe desechar el producto utilizado y gestionarlo como desecho biológico. Los depresores, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las reglamentaciones. Los depresores no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.

REF.	DESCRIPCIÓN
441142.2	DEPRESOR LENGUA PLASTICO FLOW
441242.2	DEPRESOR LENGUA MADERA FLOW

 Cantidad	 Marcado CE	 Número de lote	 Fabricante
 Referencia de catálogo	 No utilizar si el envase está dañado	 No reutilizar	 Estéril por óxido de etileno
 Producto Sanitario	 Consultar instrucciones de uso en la página web www.deltalab.es/eifus	 Fecha de fabricación	 Fecha de caducidad
 Identificador único de dispositivo	 Sistema de barrera estéril único		

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.

DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es