

ET

KEELELASTE











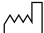



Ühekordselt kasutatav toode. Selle toote korduvkasutamine võib põhjustada infektsioone. Steriilne etüleenoksiidiga. Neid müüakse kahes materjalis:
- Mittetoksiline ja bioühilduv puit, purunemiskindla konsistentsi ja ümarate servadega, et vältida agressiivsust suupiirkonnas.
- Plastik (polüstüreen) mittetoksiline, bioühilduv ja ümarate servadega, et vältida agressiivsust suupiirkonnas.

Sellel on piisav mehaaniline konsistents, et tagada kasutamise ajal purunemise võimatus. Seda kasutatakse keelepressina, et saavutada suupiirkonna korrektne visualiseerimine ning vältida saastumist kurgu ja ninaneelu proovide võtmise ajal. Ühtne esitusviis: eraldi pakitud voolupakendisse.


Depressant on ette nähtud kasutamiseks kliinilistes haiglates. Depressandi kasutamine ei tekita sihtkasutajatele raskusi. Ei sobi muuks kasutuseks peale ettenähtud kasutuse. Seda ei tohi kasutada, kui on märke anuma purunemisest või riknemisest. Kui märkate, et seadme mahuti on kaotanud oma terviklikkuse, ärge kasutage surujat, kuna selle steriilsus ei ole garanteeritud. Seda ei tohi kasutada, kui rõhuseadmes on märgata mustust. Pragude või laastude avastamisel visake toode ära. Ärge kasutage, kui trükitud tootekirjeldus ei kuvata õigesti. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega.

Kuigi see on ebatõenäoline, võib kasutamise ajal liiga palju survet avaldada depressori puruneda. Purunemise korral visake see kohe ära. Depressandid ei vaja säilitamisel eritingimusi. Toote sihipärasest kasutusest tulenevalt kuuluvad vastuvõtjad tervishoiusektorisse ja omavad bioloogiliste jäätmete konteinereid, kuhu tuleb kasutatud toode bioloogiliste jäätmetena ära visata ja käidelda. Depressandid tuleb pärast kasutamist puhastada või käsitleda saastunud haiglajäätmetena. Iga labor vastutab jäätmete käitlemise, töötlemise ja kõrvaldamise eest vastavalt eeskirjadele. Kasutamata jäänud depressante võib pidada mitteohtlikeks toodeteks ja neid saab selle kriteeriumi alusel kõrvaldada.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 Kogus	 CE 0318	CE märgistus	 Partii number	 Tegija	
 kataloogi viide		Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud		Ära taaskasuta	 Steriilne etüleenoksiidiga
 Meditsiiniline seade		Kasutusjuhiseid leiate veebisaidilt www.deltalab.es/eifus	 Valmistamise kuupäev	 Aegumiskuupäev	
 Seadme kordumatu identifikaator		Unikaalne steriilne barjäärisüsteem			

Tootega seotud tõsise intsidendi* korral teavitage sellest nii Deltalabi, SL-i kui ka kasutaja asukohariigi pädevat asutust. * "Tõsine intsident" on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es