

fr

ABAISSÉ-LANGUE















Produit à usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections. Stériles par oxyde d'éthylène. Ils sont disponibles en deux matériaux:
 - Non toxique et biocompatible bois, la cohérence incassable et bords arrondis pour éviter l'agression sur les membranes et muqueuses.
 - Plastique non toxique (anti polystyrène choc) et biocompatible, avec des bords arrondis pour prévenir l'agression sur les membranes et muqueuses.

À une consistance mécanique suffisante pour garantir l'impossibilité de rupture pendant l'utilisation. Il est utilisé comme un abaisse-langue pour obtenir une vision correcte de la région buccale et pour prévenir la contamination pendant le prélèvement de gorge et du nasopharynx.
 Unité de présentation: sac individuel en flow-pack.


Le abaisse-langue est destiné à être utilisé dans des environnements cliniques et les hôpitaux. L'utilisation à abaisse-langue ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs visés. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si des signes de rupture ou endommagement de l'emballage. S'il apparaît que l'emballage unitaire a perdu son intégrité, ne pas utiliser l'abaisse-langue. Ne pas utiliser si la saleté est visible dans l'abaisse-langue. Veuillez jeter le produit en cas de cassure ou ébréché. Ne pas utiliser si les informations imprimées sur le produit ne s'affichent pas correctement. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Bien qu'il soit peu probable, exercer trop de pression pendant l'utilisation peut briser l'abaisse-langue. En cas de bris, jeter immédiatement. Les abaisse-langue ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. En raison de l'utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède les conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet biologique. Les abaisse-langue, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation. Des abaisse-langue non utilisés peuvent être considérés comme produits non dangereux et peuvent être éliminés par ce critère.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 Montant	 CE marking	 Code du lot	 Fabricant
 Numéro de référence	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Usage unique	 Stérile à l'oxyde d'éthylène
 Dispositif médical	 Consulter le mode d'emploi sur le site web www.deltalab.es/eifus	 Date de fabrication	 Date de péremption
 Identifiant unique de l'appareil	 Identifiant unique de l'appareil		

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.

DELTALAB, S.L.
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
 08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es