

HU

NYELVLEMPRESSZOR

Egyszer használatos termék. A termék újrafelhasználása fertőzést okozhat. Steril etilén-oxiddal. Kétféle anyagban értékesítik:
- Nem mérgező és biokompatibilis fa, törésálló állaggal és lekerékített éllel, hogy megakadályozza az agressziót a száj területén.
- Műanyag (polisztirol) nem mérgező, biokompatibilis és lekerékített éllel, hogy elkerülje az agressziót a száj területén.

Elegendő mechanikai konzisztenciájú, hogy biztosítsa, hogy használat közben ne törjön el. Nyelvyomóként használják a szájterület helyes megjelenítésére, valamint a torok- és orrgarat mintavétel során a szennyeződés megelőzésére. Egységes kiserelés: egyenként, flow-pack csomagolásban.

A depresszánst klinikai-kórházi körülmények között kell alkalmazni. A depresszáns használata nem jelent nehézséget a tervezett felhasználók számára. A rendeltetészerű használaton kívül más célra nem alkalmas. Nem szabad használni, ha a tartály törésének vagy elhasználódásának jelei vannak. Ha azt észleli, hogy az egységtartály elvesztette sértetlenségét, ne használja a lenyomót, mert nem garantált a sterilitása. Nem szabad használni, ha szennyeződést észlel a nyomófejben. Dobja ki a terméket, ha repedéseket vagy forgácsokat talál. Ne használja, ha a nyomtatott termékinformáció nem jelenik meg helyesen. Ne használja a lejárat idő után.


Bár nem valószínű, a használat közbeni túl nagy nyomás eltörheti a nyomást. Törés esetén azonnal dobja ki. A depresszánsok nem igényelnek különleges tárolási körülményeket. A termék rendeltetészerű használatából adódóan az átvevők az egészségügyi szektorhoz tartoznak, biológiai hulladéktárolókkal rendelkeznek, ahol a használt terméket biológiai hulladékként kell ártalmatlanítani és kezelni. A depresszánsokat használat után fertőtleníteni kell, vagy szennyezett kórházi hulladékként kell kezelni. Minden laboratórium feladata, hogy a hulladékot az előírásoknak megfelelően kezelje, kezelje és ártalmatlanítsa. A fel nem használt depresszánsok nem veszélyes termékeknek tekinthetők, és e kritériumok alapján ártalmatlaníthatók.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 Mennyiség	 CE jelölés	 Tételszám	 Készítő
 katalógus hivatkozás	 Ne használja, ha a csomagolás sérült	 Ne használja fel újra	 Steril etilén-oxiddal
 Orvosi eszköz	 Tekintse meg a használati utasítást a weboldalon www.deltalab.es/eifus	 Gyártás időpontja	 Lejárat dátum
 egyedi eszközazonosító	 Egyedülálló steril gárendszer		

A termékkel kapcsolatos súlyos incidens* esetén értesítse a Deltalab, SL és a felhasználó székhelye szerinti állam illetékes hatóságát. * „Súlyos esemény” alatt azt értjük, amely a beteg vagy a felhasználó halálát vagy súlyos egészségromlását vagy a közegészségügy súlyos fenyegetését vonja maga után.



 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es