

it

**ABBASSALINGUA**















Dispositivo monouso. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni. Sterilizzato con ossido di etilene. Commercializzato in due materiali:  
 - Legno atossico e biocompatibile, resistente alla rottura, con bordi arrotondati per evitare potenziali lesioni del cavo orale.  
 - Plastica (polistirene) atossica, biocompatibile e con bordi arrotondati per evitare potenziali lesioni del cavo orale.

Ha una consistenza meccanica sufficiente a garantire l'impossibilità di una rottura durante l'uso. Si utilizza come abbassalingua per ottenere una corretta visualizzazione del cavo orale e per prevenire la contaminazione durante il prelievo di campioni dalla gola e dal nasofaringe.  
 Confezioni unitarie: imbustato in buste singole tipo flow-pack.


L'abbassalingua è indicato per l'uso in ambiti clinico-ospedaliero. L'impiego dell'abbassalingua per gli utenti designati non comporta alcuna difficoltà. Non idoneo ad applicazioni che esulino dall'uso previsto. Non utilizzare in presenza di segni di rottura o deterioramento della confezione. Qualora si rilevi una perdita di integrità della confezione singola, non utilizzare l'abbassalingua in quanto la sterilità non sarà garantita. Non utilizzare nel caso in cui si osservi la presenza di sporcizia sull'abbassalingua. Smaltire il prodotto se si presenta rotto o scheggiato. Non utilizzare se le informazioni stampate sul prodotto non sono visualizzate correttamente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Sebbene sia poco probabile, esercitare una pressione eccessiva durante l'uso potrebbe causare la rottura dell'abbassalingua. In caso di rottura smaltire immediatamente. Gli abbassalingua non richiedono condizioni particolari per la conservazione. In virtù dell'uso previsto per il dispositivo, i destinatari sono operatori sanitari e dispongono di contenitori per residui biologici idonei allo smaltimento del prodotto utilizzato e alla relativa gestione quale rifiuto biologico. Gli abbassalingua, una volta utilizzati, devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio manipolare, trattare e smaltire i residui secondo i regolamenti in vigore. Gli abbassalingua non utilizzati possono essere considerati prodotti non pericolosi ed essere smaltiti conformemente.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 <b>QTY</b> Quantità	 <b>CE</b> 0318 Marcatura CE	 <b>LOT</b> Codice di lotto	 <b>F</b> Fabbricante
 <b>REF</b> Numero di catalogo	 Non utilizzare se il contenitore è danneggiato	 Non riutilizzare	 <b>STERILE EO</b> Sterile con ossido di etilene
 <b>MD</b> Dispositivo medico	 Consultare le istruzioni per l'uso sul sito Web <a href="http://www.deltalab.es/eifus">www.deltalab.es/eifus</a>	 Data di produzione	 Data di scadenza
 <b>UDI</b> Identificatore univoco del dispositivo	 Esclusivo sistema di barriera sterile		

In caso di incidente grave\* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. \*Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.



**DELTALAB, S.L.**  
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
 08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalab.es](mailto:info@deltalab.es) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)