

NL

TONGSPATEL

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product kan infecties veroorzaken. Steriel door ethyleenoxide. Verkrijgbaar in twee materialen:
- Niet-giftig en biologisch afbreekbaar hout, met splintervrije consistentie en afgeronde randen om verwondingen in de mond te voorkomen.
- Niet-giftig plastic (polystyreen), biologisch afbreekbaar en met afgeronde randen om verwondingen in de mond te voorkomen.

Met een geschikte mechanische consistentie om te garanderen dat het tijdens het gebruik niet kan breken. Gebruikt als tongspatel om een correct beeld te krijgen van de mondstreek en om contaminatie te voorkomen tijdens de hantering of nasofaryngeale bemonstering.
Presentatie: eenheidsverpakking met 1 stuks in flow-pack.

De tongspatel is bedoeld voor gebruik in klinische en ziekenhuisomgevingen. Het gebruik van de tongspatel levert geen moeilijkheden op voor de beoogde gebruikers. Niet geschikt voor andere toepassingen dan die voor het beoogd gebruik. Niet gebruiken bij tekenen van breuk of beschadiging van de verpakking. Gebruik de tongspatel niet als de eenheidsverpakking beschadigd lijkt te zijn omdat het product mogelijk niet meer steriel is. Niet gebruiken als er vuil op de tongspatel wordt waargenomen. Gooi het product weg als de tongspatel gebroken of geschilderd is. Door te hard te drukken tijdens het gebruik, kan de tongspatel breken, ook al is dit onwaarschijnlijk. Niet gebruiken als de afgedrukte productinformatie niet correct wordt weergegeven. Niet gebruiken na de vervaldatum.


In geval van beschadiging onmiddellijk weggooien. Voor de tongspatel gelden geen speciale bewaarcondities. Gezien het beoogde gebruik van het product werken de eindgebruikers in de gezondheidszorg en beschikken over speciale bakken voor biologisch afval. Het gebruikte product moet hierin worden weggegooid en worden behandeld als biologisch afval. Na gebruik moeten de tongspatels worden ontsmet of behandeld als besmet medisch afval. Het is de verantwoordelijkheid van ieder laboratorium om het afval volgens de voorschriften te behandelen en af te voeren. Ongebruikte tongspatels kunnen als onveilige producten worden beschouwd en volgens dit criterium worden verwijderd.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 Aantal	 CE-markering	 Partijcode	 Fabrikant
 Catalogusnummer	 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	 Niet opnieuw gebruiken	 Steriel door ethyleenoxide
 Medisch hulpmiddel	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de website www.deltalab.es/eifus	 Fabricagedatum	 Houdbaarheidsdatum
 Unieke identificatie van het hulpmiddel	 Enkelvoudig steriel barrièresysteem		

In geval van een ernstig incident* dat verband houdt met het product, Deltalab, S.L. alsook de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd hiervan in kennis stellen. *Onder een "ernstig incident" wordt verstaan een incident dat de dood of een ernstige verslechtering van de gezondheid van de patiënt of de gebruiker tot gevolg heeft of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt.



 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es