

fr

## ABAISSÉ-LANGUE

**Produit utilisé comme abaisse-langue pour obtenir une visualisation correcte de la zone buccale et pour prévenir la contamination lors du prélèvement de la gorge et du nasopharynx. Produit à usage unique. Les abaisse-langues sont dispositifs médicaux (DM). Pour usage professionnel uniquement.**

### Utilisation prévue :

Produit destiné au déplacement de la langue pour faciliter l'exploration des organes ou tissus adjacents. Le dépresseur est destiné à être utilisé en milieu hospitalier clinique.

### Présentation :

Ils sont disponibles en deux matériaux :

- Bois de haute qualité, avec une consistance incassable et des bords arrondis pour éviter les agressions dans la zone buccale. Ils sont conditionnés dans des cartons.
- Plastique non toxique et biocompatible (polystyrène) avec des bords arrondis pour éviter les agressions dans la zone buccale. Ils sont conditionnés en sachets verrouillables minigrip.

### Précautions générales :

1. La réutilisation de ce produit peut provoquer des infections.
2. L'utilisation du abaisse-langue ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs visés.
3. Ne convient à aucune application autre que son utilisation prévue.
4. Il ne doit pas être utilisé si de la saleté est observée dans le abaisse-langue.
5. Jetez le produit s'il s'avère qu'il est cassé ou ébréché.
6. Il a une consistance mécanique suffisante pour garantir l'impossibilité de se casser pendant l'utilisation. Bien que peu probable, l'application d'une pression excessive pendant l'utilisation pourrait casser le abaisse-langue. En cas de casse, jeter immédiatement.
7. Les abaisse-langues ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières.
8. En raison de l'utilisation prévue du produit, les destinataires appartiennent au secteur de la santé et disposent de conteneurs de déchets biologiques, où le produit utilisé doit être éliminé et géré comme un déchet biologique. Les abaisse-langues, une fois utilisés, doivent être décontaminés ou traités comme des déchets hospitaliers contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de manipuler, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation. Les abaisse-langues non utilisés peuvent être considérés comme des marchandises non dangereuses et peuvent être éliminés en fonction de ce critère.



Ne pas réutiliser



Marquage CE



Fabricant



Dispositif médical



[deltalab.es/eifus](http://deltalab.es/eifus)

Consulter le mode d'emploi sur le site web [www.deltalab.es/eifus](http://www.deltalab.es/eifus)



Date de péremption



Numéro de référence



Identifiant unique des dispositifs



Code du lot

En cas d'incident grave\* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. \*Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour la santé publique.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)