

est

PAP-TESTI SPAATEL AYRE

Toode, mis on ette nähtud selleks, et hõlbustada emakakaela proovide võtmist spetsialiseerunud tervishoiutöötajate poolt ja sobivates hügieeningimustes. Ühekordselt kasutatav toode. Ayre spaatlid on sanitaartooted (MD).

Kavandatud eesmärk:

Toode, mis on ette nähtud tsütoloogilise materjali kraapimiseks ja ekstraheerimiseks emakakaela või tupepiirkonna pinnalt patoloogiliseks uurimiseks. Mõeldud kasutamiseks kliinilistes haiglates. Neil on piisav mehaaniline konsistents, et tagada kasutamise ajal purunemise võimatus.

Esitlus:

Esitlus hulgi. Seda müüakse kahes materjalis:

- Kvaliteetne puit, purunemiskindla konsistentsiga ja ümarate servadega, et vältida limaskestade ja kudede agressiivsust.
- Plastik (polüpropüleen) ümarate servadega, et vältida limaskestade ja kudede agressiivsust.

Üldised ettevaatusabinõud:

1. Spaatli kasutamine ei valmista ettenähtud kasutajatele raskusi.
2. Ei sobi muuks otstarbeks peale ettenähtud kasutuse.
3. Selle toote korduvkasutamine võib põhjustada infektsioone.
4. Ärge kasutage, kui spaatliil on nähtav mustus. Visake toode ära, kui see on katki või mõranenud.
5. Kasutamise ajal ei tohi avaldada tugevat survet, kuna spaatel võib puruneda (ebatõenäoline, kuna selle purustamiseks vajalik jõud on märkimisväärne). Purunemise korral visake see kohe ära.
6. Spaatlid ei vaja säilitamisel eritingimusi.
7. Toote sihipärasest kasutusest tulenevalt kuuluvad vastuvõtjad tervishoiusektorisse, omavad bioloogiliste jäätmete konteinereid, kuhu tuleb kasutatud toode ära visata ja käidelda bioloogiliste jäätmetena. Kasutatud spaatlid tuleb puhastada saastest või käsitleda saastunud haigla-jäätmetena. Iga labor vastutab jäätmete käitlemise, töötlemise ja kõrvaldamise eest vastavalt eeskirjadele. Kasutamata spaatleid võib pidada mitteohtlikeks kaupadeks ja neid saab vastavalt sellele kriteeriumile kõrvaldada.



Ühekordselt kasutamiseks



CE märgistus



Tootja



Meditsiiniseade



deltalab.es/eifus

Tutvuda veebilehel avaldatud kasutusjuhendiga www.deltalab.es/eifus



Aegumiskuupäev



Katalooginumber



Seadme kordumatu identifikaator



Partiinumber

Tootega seotud tõsise intsidendi* korral teavitage mõlemat Deltalab, S.L. samuti selle riigi pädev asutus, kus kasutaja on asutatud. *Tõsine intsident on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es