

fr

SPATULE DE AYRE

Produit destiné à faciliter le prélèvement d'échantillons cervicaux par du personnel de santé spécialisé et dans les conditions d'hygiène appropriées.
Produit à usage unique. Les spatules Ayre sont dispositifs médicaux (MD).

Utilisation prévue :

Produit destiné au grattage et à l'extraction de matériel cytologique de la surface du col de l'utérus ou de la zone vaginale pour examen pathologique. Destiné à être utilisé en milieu clinique-hospitalier. Ils ont une consistance mécanique suffisante pour garantir l'impossibilité de se casser lors de l'utilisation.

Présentation :

Présentation en vrac. Il est commercialisé en 2 matières :

- Bois de haute qualité, avec une consistance incassable et des bords arrondis pour éviter l'agressivité sur les muqueuses et les tissus.
- Plastique (Polypropylène) à bords arrondis pour éviter toute agressivité sur les muqueuses et les tissus.

Précautions générales :

1. L'utilisation de la spatule ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs visés.
2. Ne convient à aucune application autre que l'utilisation prévue.
3. La réutilisation de ce produit peut provoquer des infections.
4. Ne pas utiliser si de la saleté est visible sur la spatule. Jeter le produit s'il s'avère qu'il est cassé ou ébréché.
5. Une forte pression ne doit pas être exercée pendant l'utilisation car la spatule peut se casser (peu probable car la force nécessaire pour la casser est considérable). En cas de casse, jeter immédiatement.
6. Les spatules ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières.
7. En raison de l'utilisation prévue du produit, les destinataires appartiennent au secteur de la santé et disposent de conteneurs de déchets biologiques où le produit utilisé doit être éliminé et géré comme un déchet biologique. Les spatules, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets hospitaliers contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de manipuler, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation. Les spatules non utilisées peuvent être considérées comme des marchandises non dangereuses et peuvent être éliminées conformément à ce critère.



Ne pas réutiliser



Marquage CE



Fabricant



Dispositif médical



deltalab.es/eifus

Consulter le mode d'emploi sur le site web www.deltalab.es/eifus



Date de péremption



Numéro de référence



Identifiant unique des dispositifs



Code du lot

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es