

ET

NAILONIST FLOKEERITUD TAMPOON TRANSPORTMEEDIAGA JA ILMA

Kasutusala:

Steriilne kirurgilist tüüpi invasiivne proovivõtusüsteem otsese kontakti kaudu patsiendiga, transpordi-/rikastuskeskkonnaga ja ilma. Mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Steriliseerimismeetod on näidatud esmasel pakendil. Transpordikandjad on meditsiiniseadmed in vitro diagnostikaks (IVD), samal ajal kui tampoonid, söötmega või ilma, on meditsiiniseadmed (MD), millel on CE0318 sertifikaat.

Esitus:

Tampoon koosneb polüstüreenpulgast ja flokeeritud nailoni peast. Need on erineva kuju ja suurusega olenevalt proovivõtu asukohast: standardne flokeeritud tampoon, ureetra flokeeritud tampoon, ninaneelu flokeeritud tampoon ja minitip flokeeritud tampoon. Toode on ette nähtud bioloogiliste proovide kogumiseks ja transportimiseks mikrobioloogiliseks analüüsiks sobivates hügieeni tingimustes professionaalsete tervishoiuspetsialistide poolt.

Flokeeritud tampoonid ilma söötmeta pakitakse eraldi tuubi, koorimis- või voolupakendisse.

Transpordikeskkonda sisaldavate tuubidega flokeeritud tampoonid pakitakse üksikult koorimis- või voolupakendisse.












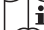


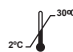

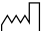


Tampoon on ette nähtud kasutamiseks kahes etapis:

- 1) proovi võtmine tervishoiutöötaja poolt kliinilises-haiglates ja selle transportimine.
- 2) proovi töötlemine spetsialiseerunud tervishoiutöötajate poolt kliinilistes haiglates. Tampooni kasutamine ei tekita raskusi sihtkasutajatele, kuna komplekti konteiner sisaldab konkreetseid juhiseid selle kohta, kuidas kasutaja peaks jätkama proovide korrektset kogumist ja selle hooldust kuni selle kohaletoimetamiseni laboratooriumisse.

Üldised ettevaatusabinõud:

Ei sobi muuks kasutuseks peale ettenähtud kasutuse. Ärge kasutage, kui pakendil on purunemise või kahjustuste märke. Kui näete, et üksikpakend on kaotanud oma terviklikkuse, ärge kasutage tampooni, kuna selle steriilsus ei ole garanteeritud. Ärge kasutage, kui märkate, et tampoon on määrdunud. Visake toode ära, kui leiata katkised, servadega või ilma peata harjad. Ärge kasutage, kui transpordi tampooni vedelik koos söötmega on hägune või tundub muutunud. Ainult ühekordseks kasutamiseks, toote korduvkasutamine võib põhjustada infektsioone. Käsitsege hoolikalt. Igasugune tugev surve kasutamise ajal, mis on ebatõenäoline, võib tampooni murda. Kahjustuse korral visake see kohe ära. Transpordivahenditeta tampoonid ei vaja erilisi ladustamise tingimusi. Transporditampooni koos söötmega tuleb hoida temperatuurivahemikus 2 °C kuni 30 °C. Kaitsta niiskuse eest. Pärast kasutamist tuleb tampoonid dekontamineerida või käsitleda saastunud meditsiinijäätmetena, välja arvatud viiruse inaktiveeriva söötmega MTVI kasutatud tampoonid, mida peetakse üldjäätmeteks, kuna proovis olev viirusproov on inaktiveeritud. Iga labori kohustus on jäätmete käitlemine, töötlemine ja kõrvaldamine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kasutamata tampoone võib pidada mitteohtlikeks toodeteks ja need võib vastavalt utiliseerida. Kõik ülaltoodu kehtib flokeeritud tampooniga kaasas oleva rikastuskeskkonna kohta. Ärge kasutage, kui kõlblikkusaeg on ületatud. Ärge kasutage, kui mõni komponent puudub või kui prinditud tooteteavet ei kuvata õigesti. Ärge mingil juhul neelake transpordivahendit alla.


Sümbolite sõnastik:

 Kataloogi number	 Partii number	 Tutvu kasutusjuhistega veebisaidil www.deltalab.es/eifus	 Kogus	 Steriilne poolt kiiritamine
 In vitro diagnostika	 Meditsiiniline seade	 Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	 Mitte uuesti kasutada	 Steriilne poolt Etüleenoksiid
 Hoida eemal päikesevalgusest	 Tootja	 Aegumis kuupäev	 CE-märkis 0318	 Säilitamise temperatuur 2°C - 30°C
 Kordumatu identifitseerimistunnus	 Valmistamise kuupäev	 Unikaalne steriilne barjäärisüsteem	 Hoida kuivas	

Tootega seotud tõsise insidendi* korral teavitage Deltalabi, SL-i ja selle riigi pädevat asutust, kus kasutaja asub. * "Tõsine insident" on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.

Tampoon kogumiseks: 

Söötmega toru: 

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

Reference	Description
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
300267	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.100MM
300269	FLOCKED SWAB PS STANDARD 80MM TUBE
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW
310208K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 100MM FLOW
304230	VICUM 2ML FLOCKED SWAB NASO 100MM
304225F	AMIES 1ML FLOCKED SWAB NASOPH. 100MM FLOW
304246F	VIRUS 3ML FLOCK SWAB MINITIP 100MM FLOW
304230K.2S	VICUM 2ML FLOCKED ST80MM+NASO 80MM
304230KF.2S	VICUM 2ML FLOCK SWAB STD80MM+NASO80MM FLOW
304222KF	AMIES 1ML FLOCKED SWAB URETRAL 80MM FLOW
304234KF	VICUM 2ML FLOCKED SWAB NASOPH.80MM FLOW
304221KF	AMIES 1ML FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304221KF.2S	AMIES 1ML FLOCKED NASOPH 80MM+ST 80MM FLOW
304223KF	AMIES 1ML FLOCK.SWAB NASOPH. 80MM FLOW
304224KF	AMIES 1ML FLOCK.SWAB MINITIP 80MM FLOW
304260KF	CARY BLAIR 2ML FLOCK.SWAB ST. 80MM FLOW
304305KF	VIRUS 3ML FLOCK SWAB NASOPH. 80MM FLOW
304243KF	VIRUS 3ML FLOCK SWAB STANDARD 80MM FLOW
304227KF	AMIES 2ML FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304243KFI	INACT. VIRUS 3ML FLOCK.SWAB ST 80MM FLOW
304305KF.2S	VIRUS 3ML FLOCK SWAB STD 80MM+NAS80MM FLOW
304305KFI	INACT. VIRUS 3ML FLOCK SWAB NAS. 80MM FLOW
304230F	VICUM 2ML FLOCK SWAB NASOPH. 100MM FLOW
304236KF	VICUM 2ML FLOCK SWAB URET. 80MM FLOW
304213KF	LIM BROTH 2ML FLOCK SWAB STD 80MM FLOW
304238KF	VICUM 2ML FLOCK SWAB STD 80MM FLOW
304305KFI.2S	INACT. VIRUS 3ML FLOCKED STD80MM+NAS 80MM FL.
304228KF.3	AMIES 3ML 3 FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304213KFB	GAL.VAG. LIM BROTH 2 ML FLOCK SWAB ST. FLOW
304221KF.M	AMIES 1ML FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304223KF.M	AMIES 1ML FLOCK SWAB NASOPH. 80MM FLOW
304224KF.M	AMIES 1ML FLOCK.SWAB MINITIP 80MM FLOW
304222KF.M	AMIES 1ML FLOCKED SWAB URETRAL 80MM FLOW
304233F	VICUM 3ML FLOCK SWAB STD 100MM FLOW
304233F.2S	VICUM 3ML FLOCK SWAB ST100MM+NAS100MM FLOW
304239KF	VICUM 2ML FLOCK SWAB MINITIP 80MM FLOW