

## ESPÁTULA DE AYRE

Producto de un solo uso. La reutilización de este producto puede causar infecciones. Estéril por óxido de etileno. Se comercializa en 2 materiales:

- Madera de consistencia inastillable y bordes redondeados para evitar la agresividad sobre las mucosas y tejidos.
- Plástico (polipropileno) atóxico y con bordes redondeados para evitar la agresividad sobre las mucosas y tejidos.

Tiene una consistencia mecánica suficiente para asegurar la imposibilidad de rotura durante su uso. Producto destinado a facilitar la toma de muestras cervicales por personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas. Presentación unitaria: embolsados unitariamente en flow-pack o en peel-pack.

La espátula está destinada a ser utilizada en entornos clínicos-hospitalarios. El uso de la espátula no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos. No apta para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe usarse si hay signos de rotura o deterioro del envase. Si se observa que el envase unitario ha perdido su integridad, no utilizar la espátula debido a que podría haber perdido su condición de esterilidad. No debe usarse si se observa suciedad en la espátula. Desechar el producto si se encuentra alguna rota o con astillas. No usar si la información impresa del producto no se visualiza correctamente. No usar después de la fecha de caducidad.

No debe ejercerse una fuerte presión durante el uso ya que la espátula podría romperse (poco probable, ya que la fuerza necesaria para romperla es considerable). En caso de rotura, desechar inmediatamente. Las espátulas no precisan de condiciones especiales de conservación. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario, y disponen de contenedores de residuos biológicos donde se debe desechar el producto utilizado, y gestionarlo como desecho biológico. Las espátulas, una vez utilizadas, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según reglamentaciones. Las espátulas no utilizadas pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.

REF.	DESCRIPCIÓN
444150	ESPATULA AYRE MADERA PEEL
444142	ESPATULA AYRE PLASTICO PEEL
444242	ESPATULA AYRE PLASTICO FLOW

## CEPILLO CERVICAL















Producto de un solo uso. La reutilización de este producto puede causar infecciones. Estéril por óxido de etileno.

Se utiliza en la toma de muestras endocervicales destinadas a estudios de laboratorio (citológicos, anatomopatológicos, microbiológicos, etc.). La forma y la textura de la cabeza permiten tomar una cantidad de muestra suficiente en caso de tener que realizar más de una prueba. Producto destinado a facilitar la toma de muestras cervicales por personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas. No debe ser utilizado en caso de embarazo. Presentación unitaria: embolsados unitariamente en peel-pack.

El cepillo cervical está destinado a ser utilizado en entornos clínicos-hospitalarios. El uso del cepillo cervical no presenta ninguna dificultad para los usos previstos. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe utilizarse si hay signos de rotura o deterioro del envase. Si se observa que el envase unitario ha perdido su integridad, no utilizar el cepillo debido a que podría haber perdido su condición de esterilidad. No debe usarse si se observa suciedad en el cepillo. Desechar el producto si se encuentra alguno roto o sin cabeza. No usar si la información impresa del producto no se visualiza correctamente. No usar después de la fecha de caducidad.

No debe ejercerse una fuerte presión durante el uso, ya que el cepillo cervical podría romperse (poco probable ya que la fuerza necesaria para romperlo es considerable). En caso de rotura, desechar inmediatamente. Los cepillos cervicales no precisan condiciones especiales de conservación. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario, y disponen de contenedores de residuos biológicos, donde se debe desechar el producto utilizado, y gestionarlo como desecho biológico. Los cepillos cervicales, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las reglamentaciones. Los cepillos no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.

REF.	DESCRIPCIÓN
440151	CEPILLO CERVICAL PEEL PACK

 Cantidad	 Marcado CE	 Número de lote	 Fabricante
 Referencia de catálogo	 No utilizar si el envase está dañado	 No reutilizar	 Estéril por óxido de etileno
 Producto Sanitario	 Consultar instrucciones de uso en la página web <a href="http://www.deltalab.es/eifus">www.deltalab.es/eifus</a>	 Fecha de fabricación	 Fecha de caducidad
 Identificador único de dispositivo	 Sistema de barrera estéril único		

En caso de incidente grave\* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. \*Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.