



AYRE-LASTA

Vain kertakäyttöön. Tuotteen uudelleen käyttäminen voi aiheuttaa infektoita. Steriloitu eteenioksidilla. Saatavilla kaksi materiaalia:
- Murtumaton puu ja pyöristetetyt reunat, jotka ehkäisevät limakalvo- ja kudonsvaurioita.
- Myrkytön muovi (polypropeeni), jonka pyöristetetyt reunat ehkäisevät limakalvo- ja kudonsvaurioita.

Asianmukainen mekaaninen koostumus takaa, ettei lasta murru käytön aikana. Laite on tarkoitettu helpottamaan näytteenottoa kohdunnapakasta. Se on tarkoitettu erikoistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön asianmukaisissa hygieenisissä olosuhteissa. Ulkonäkö: yksittäispakattu flow-pack- tai peel-pack-pakkaukseen.

Lasta on tarkoitettu käytettäväksi kliinisissä ja sairaalaympäristöissä. Lastan käyttö ei ole vaikeaa tarkoitetuille käyttäjille. Ei sovellu mihinkään muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. Älä käytä lastaa, jos pakkauksessa on rikkoutumisen tai vahingoittumisen merkkejä. Hävitä lasta, jos yksittäispakkauksessa on merkkejä eheyden heikkenemisestä, sillä se voi olla merkki steriiliyden menetyksestä. Älä käytä, jos lastassa näkyy likaa. Hävitä tuote, jos löydät rikkinäisiä tai haljonneita lastoja. Älä käytä, jos painetut tuotetiedot eivät näy oikein. Älä käytä tuotteen viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Älä kohdistaa lastaan paljon voimaa käytön aikana tai se voi rikkoutua (tämä on melko epätodennäköistä, koska rikkoutuminen edellyttää huomattavasti voimaa). Jos lasta on rikki, hävitä se välittömästi. Lastaa ei tarvitse säilyttää erityisissä olosuhteissa. Tuotteen käyttötarkoituksesta johtuen loppukäyttäjät ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on käytössään biovaaralliselle jätteelle tarkoitettuja astioita, joihin käytetty tuote voidaan hävittää ja käsitellä biologisena jätteenä. Käytetyt lastat on puhdistettava tartunnanaiheuttajista tai käsiteltävä saastuneena terveydenhuollon jätteenä. Laboratorioiden vastuulla on käsitellä ja hävittää jätteet asetusten mukaisesti. Käyttämättömiä lastoja voidaan pitää vaarattomina tuotteina, ja ne voi hävittää näiden kriteerien mukaisesti.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW












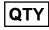


SYTOLOGIAHARJA

Vain kertakäyttöön. Tuotteen uudelleen käyttäminen voi aiheuttaa infektoita. Steriloitu eteenioksidilla.

Tuotteen käyttötarkoitus on kohdunkaulan kanavan näytteiden otto laboratoriotutkimuksia varten (sytologinen, anatomispatologinen, mikrobiologinen jne.). Pään muodon ja tekstuurin ansiosta näytteenotto on tarkkaa, eikä limakalvo vahingoitu. Käyttäjä voi ottaa harjalla riittävästi näytettä, jos testejä tarvitaan useampia. Tuotteen käyttötarkoitus on kohdunkaulan näytteiden otto. Se on tarkoitettu erikoistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön asianmukaisissa hygieenisissä olosuhteissa. Älä käytä, jos potilas on raskaana. Yksikön ulkonäkö: yksittäispakattu peel-pack-pakkaukseen.

Sytologiaharja on tarkoitettu käytettäväksi kliinisissä ja sairaalaympäristöissä. Sytologiaharjan käyttö ei ole vaikeaa tarkoitetuille loppukäyttäjille. Ei sovellu mihinkään muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. Älä käytä tuotetta, jos pakkauksessa on rikkoutumisen tai vahingoittumisen merkkejä. Älä käytä tuotetta, jos yksittäispakkauksessa on merkkejä eheyden heikkenemisestä, sillä se voi olla merkki steriiliyden menetyksestä. Älä käytä, jos harjassa näkyy likaa. Hävitä tuote, jos löydät rikkinäisiä tai päättömiä harjoja. Älä käytä, jos painetut tuotetiedot eivät näy oikein. Älä käytä tuotteen viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Älä kohdistaa sytologiaharjaan paljon voimaa käytön aikana tai se voi rikkoutua (tämä on epätodennäköistä, koska rikkoutuminen edellyttää huomattavasti voimaa). Jos lasta on rikki, hävitä se välittömästi. Sytologiaharjaa ei tarvitse säilyttää erityisissä olosuhteissa. Tuotteen käyttötarkoituksesta johtuen loppukäyttäjät ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on käytössään biovaaralliselle jätteelle tarkoitettuja astioita, joihin käytetty tuote voidaan hävittää ja käsitellä biologisena jätteenä. Laboratorioiden vastuulla on käsitellä ja hävittää jätteet asetusten mukaisesti. Käyttämättömiä harjoja voidaan pitää vaarattomina tuotteina, ja ne voi hävittää näiden kriteerien mukaisesti.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

 Määrä	 CE-merkintä	 Eräkoodi	 Valmistaja
 Luettelonumero	 Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut	 Ei saa käyttää uudelleen	 Steriloitu eteenioksidilla
 Lääkinnällinen laite	 Tutustu käyttöohjeisiin sivustolla www.deltalab.es/eifus	 Valmistuspäivä	 Viimeinen käyttöpäivä
 Yksilöllinen laitetunniste	 Yksilöllinen steriilitejärjestelmä		

Jos tuotteen yhteydessä ilmenee vakava haittapahtuma*, ilmoita siitä Deltalab, S.L. -yhtiölle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä on sijoittunut. *"Vakava haittapahtuma" tarkoittaa sellaista, johon liittyy potilaan tai käyttäjän kuolema tai terveydentilan vakava heikkeneminen tai vakava kansanterveysuhka.

