

SPATULE DE AYRE

À usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections. Stérile par l'oxyde d'éthylène. Il est disponible en deux matériaux:

- Bois la cohérence incassable et bords arrondis pour éviter l'agression sur les membranes et muqueuses.
- Plastique non toxique (polypropylène), avec des bords arrondis pour prévenir l'agression sur les membranes et muqueuses.

À une consistance mécanique suffisante pour garantir l'impossibilité de rupture pendant l'utilisation. Produit conçu pour faciliter l'échantillonnage du col de l'utérus par un personnel de santé qualifié et dans des conditions d'hygiène appropriées. Unité de Présentation: sac individuel en flow-pack ou peel-pack.

La spatule est destinée à être utilisée dans des environnements cliniques et les hôpitaux. L'utilisation à spatule ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs visés. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si des signes de rupture ou endommagement de l'emballage. S'il apparaît que l'emballage unitaire a perdu son intégrité, ne pas utiliser la spatule. Ne pas utiliser si la saleté est visible dans la spatule. Veuillez jeter le produit en cas de cassure ou ébréché. Ne pas utiliser si les informations imprimées sur le produit ne s'affichent pas correctement. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Ne pas exercer de forte pression pendant l'utilisation, car le couteau pourrait se briser (peu probable, puisque la force nécessaire pour le rompre est considérable). En cas de bris, jeter immédiatement. Les spatules ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. En raison de l'utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède dans des conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet biologique. Les spatules, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW

BROSSE ENDOCERVICALE















À usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections. Stérile par l'oxyde d'éthylène.

Il est utilisé dans les échantillons endocervicaux pour les études de laboratoire (cytologique, pathologique, microbiologiques, etc.). La forme et la texture de la tête vous permettent de prendre une quantité suffisante d'échantillon dans le cas où vous devez effectuer plus d'un test. Produit conçu pour faciliter l'échantillonnage du col de l'utérus par un personnel de santé qualifié et dans des conditions d'hygiène appropriées. Il ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Emballage : sac individuel peel-pack.

La brosse col de l'utérus est destinée à être utilisée dans des environnements cliniques et hospitaliers. L'utilisation de la brosse cervicale ne présente aucune difficulté pour les utilisations prévues. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si des signes de rupture ou d'endommagement de l'emballage. S'il apparaît que l'emballage a perdu son intégrité, ne pas utiliser la brosse. Ne pas utiliser si la saleté est observée dans la brosse. Jeter le produit s'il est cassé ou sans tête. Ne pas utiliser si les informations imprimées sur le produit ne s'affichent pas correctement. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Ne pas exercer une forte pression pendant l'utilisation, car la brosse cervicale peut casser (peu probable puisque la force nécessaire pour briser est considérable). En cas de rupture, jeter immédiatement. Les brosses cervicales ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. En raison de l'utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède des conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet biologique. Les brosses cervicales, une fois utilisée, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets selon les règlements. Les brosses non utilisés peuvent être considérés comme non dangereuses et peuvent être éliminés par ce critère.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

 Montant	 CE marking	 Code du lot	 Fabricant
 Numéro de référence	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Usage unique	 Stérile à l'oxyde d'éthylène
 Dispositif médical	 Consulter le mode d'emploi sur le site web www.deltalab.es/eifus	 Date de fabrication	 Date de péremption
 Identifiant unique de l'appareil	 Identifiant unique de l'appareil		

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.