



AYRE SPATULA

Prodotto monouso. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni. Sterile con ossido di etilene. Viene venduto in 2 materiali:
 - Legno di consistenza infrangibile e bordi arrotondati per evitare aggressività su mucose e tessuti.
 - Plastica atossica (polipropilene) con bordi arrotondati per evitare aggressività su mucose e tessuti.

Ha una consistenza meccanica sufficiente per garantire l'impossibilità di rottura durante l'uso. Prodotto studiato per facilitare il prelievo di campioni cervicali da parte di personale sanitario specializzato e in condizioni igieniche adeguate. Presentazione unitaria: confezionata singolarmente in flow-pack o peel-pack.

La spatola è destinata all'uso in ambienti clinico-ospedalieri. L'utilizzo della spatola non presenta alcuna difficoltà per gli utenti previsti. Non adatto per qualsiasi altra applicazione diversa dall'uso previsto. Non dovrebbe essere usato se ci sono segni di rottura o deterioramento del contenitore. Se si osserva che la confezione unitaria ha perso la sua integrità, non utilizzare la spatola perché potrebbe aver perso la sua condizione di sterilità. Non deve essere utilizzato se si osserva sporco sulla spatola. Scartare il prodotto se viene trovato rotto o scheggiato. Non utilizzare se le informazioni stampate sul prodotto non sono visualizzate correttamente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non si deve esercitare una forte pressione durante l'uso in quanto la spatola potrebbe rompersi (improbabile in quanto la forza necessaria per romperla è notevole). In caso di rottura, scartare immediatamente. Le spatole non richiedono particolari condizioni di conservazione. A causa della destinazione d'uso del prodotto, i destinatari appartengono al settore sanitario e dispongono di contenitori per rifiuti biologici in cui il prodotto utilizzato deve essere smaltito e gestito come rifiuto biologico. Le spatole, una volta utilizzate, devono essere decontaminate o trattate come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio gestire, trattare e smaltire i rifiuti secondo le normative. Le spatole non utilizzate possono essere considerate prodotti non pericolosi e possono essere smaltite secondo questi criteri.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW

SPAZZOLA CERVICALE















Prodotto monouso. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni. Sterile con ossido di etilene.

Viene utilizzato nel prelievo di campioni endocervicali per studi di laboratorio (citologici, patologici, microbiologici, ecc.). La forma e la consistenza della testa consentono di prelevare una quantità sufficiente di campione nel caso si debba eseguire più di una prova. Prodotto studiato per facilitare il prelievo di campioni cervicali da parte di personale sanitario specializzato e in condizioni igieniche adeguate. Non dovrebbe essere usato in caso di gravidanza. Presentazione unità: unità insaccata in peel-pack.


Lo spazzolino cervicale è destinato all'uso in ambienti clinico-ospedalieri. L'utilizzo dello scovolino cervicale non presenta alcuna difficoltà per gli usi previsti. Non adatto per qualsiasi altra applicazione diversa dall'uso previsto. Non dovrebbe essere usato se ci sono segni di rottura o deterioramento del contenitore. Se si osserva che la confezione dell'unità ha perso la sua integrità, non utilizzare la spazzola in quanto potrebbe aver perso la sua condizione di sterilità. Non deve essere utilizzato se si osserva sporco sulla spazzola. Scartare il prodotto se viene trovato rotto o senza testa. Non utilizzare se le informazioni stampate sul prodotto non sono visualizzate correttamente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.


Non si deve esercitare una forte pressione durante l'uso, poiché lo spazzolino cervicale potrebbe rompersi (improbabile poiché la forza necessaria per romperlo è considerevole). In caso di rottura, scartare immediatamente. Gli spazzolini cervicali non richiedono condizioni di conservazione speciali. A causa della destinazione d'uso del prodotto, i destinatari appartengono al settore sanitario, e dispongono di contenitori per rifiuti biologici, dove il prodotto usato deve essere smaltito e gestito come rifiuto biologico. Gli spazzolini cervicali, una volta utilizzati, devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio gestire, trattare e smaltire i rifiuti secondo le normative. Le spazzole inutilizzate possono essere considerate prodotti non pericolosi e possono essere smaltite secondo questi criteri.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

 QTY Quantità	 CE 0318 Marcatura CE	 LOT Codice di lotto	 Fab Fabbricante
 REF Numero di catalogo	 Non utilizzare se il contenitore è danneggiato	 Non riutilizzare	 STERILE EO Sterile con ossido di etilene
 MD Dispositivo medico	 Consultare le istruzioni per l'uso sul sito Web www.deltalab.es/efus	 Data di produzione	 Data di scadenza
 UDI Identificatore univoco del dispositivo	 Esclusivo sistema di barriera sterile		

In caso di incidente grave* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. *Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.

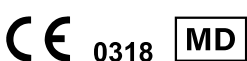

 DELTALAB, S.L.
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
 08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es