

AYRE ŠPĀTELE

Vienreiz lietojams produkts. Šī produkta atkārtota izmantošana var izraisīt infekcijas. Sterilizēts etilēna oksidā. Pieejams 2 materiālos:

- Koksne ar nepļīstošu konsistenci un noapaļotām malām, lai izvairītos no ievainojumiem gļotādā un audos.
- Netoksiska plastmasa (polipropilēns) ar noapaļotām malām, lai izvairītos no ievainojumiem gļotādā un audos.

Tam ir pietiekama mehāniskā konsistence, lai nodrošinātu, ka lietošanas laikā tas nesalūzt. Produkts, kas paredzēts, lai atvieglotu dzemdes kakla paraugu ņemšanu specializētam veselības personālam un atbilstošos higiēnas apstākļos. Noformējums: atsevišķi iepakots plūsmas iepakojumā vai noņemamā iepakojumā.

Lāpstiņa ir paredzēta lietošanai klīniskos un slimnīcas apstākļos. Lāpstiņas lietošana paredzētajiem lietotājiem nesagādā nekādas grūtības. Nav piemērots jebkuram citam pielietojumam, izņemot paredzēto lietojumu. To nedrīkst lietot, ja ir iepakojuma lūzuma vai bojājuma pazīmes. Ja tiek novērots, ka iepakojums ir zaudējis savu integritāti, nelietojiet špāтели, ja tā varētu būt zaudējusi sterilitāti. To nedrīkst lietot, ja uz špāteles ir novēroti netīrumi. Izmetiet produktu, ja tiek konstatētas plaisas vai šķembas. Nelietojiet, ja drukātā produkta informācija netiek pareizi attēlota. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Lietošanas laikā nevajadzētu izdarīt spēcīgu spiedienu, jo lāpstiņa var salūzt (maz ticams, jo spēks, kas nepieciešams, lai to salauztu, ir ievērojams). Bojājuma gadījumā nekavējoties izmetiet. Lāpstiņām nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Preces paredzētā lietojuma dēļ saņēmēji pieder veselības nozarei, un tiem ir bioloģisko atkritumu konteineri, kuros izlietotā prece ir jālikvidē un jāapsaimnieko kā bioloģiskie atkritumi. Kad lāpstiņas ir izmantotas, tās ir jāattīra vai jāapstrādā kā inficēti slimnīcas atkritumi. Katra laboratorija ir atbildīga par atkritumu apstrādi un likvidēšanu saskaņā ar noteikumiem. Neizmantotās lāpstiņas var uzskatīt par nebīstamiem produktiem, un tās var atbrīvoties saskaņā ar šiem kritērijiem. Katra laboratorija ir atbildīga par atkritumu apstrādi un likvidēšanu saskaņā ar noteikumiem. Neizmantotās lāpstiņas var uzskatīt par nebīstamiem produktiem, un no tām var atbrīvoties saskaņā ar šiem kritērijiem.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW

DZEMDES KAKLA BIRSTĪTE






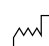


Vienreiz lietojams produkts. Šī produkta atkārtota izmantošana var izraisīt infekcijas. Sterilizēts etilēna oksidā.

To izmanto endocervikālo paraugu ņemšanai laboratorijas pētījumiem (citoloģiskiem, patoloģiskiem, mikrobioloģiskiem u.c.). Galvas forma un struktūra ļauj paņemt pietiekamu daudzumu parauga, ja jāveic vairāk nekā viens tests. Produkts, kas paredzēts, lai atvieglotu dzemdes kakla paraugu ņemšanu specializētam veselības personālam un atbilstošos higiēnas apstākļos. To nedrīkst lietot grūtniecības gadījumā. Noformējums: iepakots vienotā iepakojumā.

Dzemdes kakla birstīte ir paredzēta lietošanai klīniskos un slimnīcas apstākļos. Dzemdes kakla birstītes lietošana paredzētajam lietojumam nerada nekādas grūtības. Nav piemērots jebkuram citam lietojumam, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietot, ja ir iepakojuma lūzuma vai bojājuma pazīmes. Ja tiek novērots, ka iepakojums ir zaudējis savu integritāti, nelietojiet birstīti, jo tā varētu būt zaudējusi sterilitāti. To nedrīkst lietot, ja uz birstītes ir novēroti netīrumi. Izmetiet produktu, ja kāds ir salauzts vai trūkst galvas. Nelietojiet, ja drukātā produkta informācija netiek pareizi attēlota. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Lietošanas laikā nevajadzētu izdarīt spēcīgu spiedienu, jo dzemdes kakla birstīte var salūzt (maz ticams, jo spēks, kas nepieciešams, lai to salauztu, ir ievērojams). Bojājuma gadījumā nekavējoties izmetiet. Dzemdes kakla birstēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Preces paredzētā lietojuma dēļ saņēmēji pieder veselības nozarei, un tiem ir bioloģisko atkritumu konteineri, kuros izlietotā prece ir jālikvidē un jāapsaimnieko kā bioloģiskie atkritumi. Dzemdes kakla birstes, kad tās ir lietotas, ir jādezinficē vai jāapstrādā kā piesārņoti slimnīcas atkritumi. Katra laboratorija ir atbildīga par atkritumu apstrādi un likvidēšanu saskaņā ar noteikumiem. Neizmantotās birstes var uzskatīt par nebīstamu produktu, un no tām var atbrīvoties atbilstoši šiem kritērijiem.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

QTY Quantity	 CE 0318 CE marking	LOT Batch code	 Manufacturer
REF Catalogue number	 Do not use if Package is damaged	 Do not re-use	STERILE Sterile by Ethylene Oxide
MD Medical Device	 Consult instructions for use on the website www.deltalab.es/eifus	 Manufacturing date	 Use-by-date
UDI Unique device identifier	 Unique sterile barrier system		

In case of a serious incident* related to the product, notify to Deltalab, S.L. as well as the competent authority of the State in which the user is established.

*A "serious incident" is understood as one that entails the death, or serious deterioration of the health of the patient or user or a serious threat to public health.