

AYRE-SPATEL

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product kan infecties veroorzaken. Steriel door ethyleenoxide. Verkrijgbaar in twee materialen:

- Hout met splintervrije consistentie en afgeronde randen om verwondingen in mucus en weefsels te voorkomen.
- Niet-giftig plastic (polypropyleen), met afgeronde randen om verwondingen in mucus en weefsels te voorkomen.

Het heeft een geschikte mechanische consistentie om te garanderen dat het tijdens het gebruik niet kan breken. Het product is bedoeld om baarmoederhalsbemonstering door gespecialiseerde gezondheidswerkers te vergemakkelijken en voor gebruik in passende hygiënische omstandigheden. Presentatie: eenheidsverpakking met 1 stuks in folie verpakt in flow- of peel-pack.

De spatel is bedoeld voor gebruik in klinische en ziekenhuisomgevingen. Het gebruik van de spatel levert geen moeilijkheden op voor de beoogde gebruikers. Niet geschikt voor andere toepassingen dan die voor het beoogd gebruik. Niet gebruiken bij tekenen van breuk of beschadiging van de verpakking. Gooi het product weg als de eenheidsverpakking beschadigd lijkt te zijn omdat het mogelijk niet meer steriel is. Niet gebruiken als er vuil in de spatel wordt waargenomen. Gooi het product weg als de spatel gebroken of geschilderd is. Niet gebruiken als de afgedrukte productinformatie niet correct wordt weergegeven. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Tijdens het gebruik mag er geen sterke druk op worden uitgeoefend omdat anders de spatel kan breken (wat vrij onwaarschijnlijk is omdat er een aanzienlijk kracht nodig is om de spatel te breken). Als deze gebroken is, gooi hem dan onmiddellijk weg. Voor de spatel gelden geen speciale bewaarcondities. Gezien het beoogde gebruik van het product zijn de eindgebruikers gezondheidswerkers die beschikken over speciale bakken voor biologisch afval. Het gebruikte product moet hierin worden weggegooid en behandeld als biologisch afval. Na gebruik moeten de spatels worden ontsmet of behandeld als besmet medisch afval. Het is de verantwoordelijkheid van ieder laboratorium om het afval volgens de voorschriften te behandelen en af te voeren. Ongebruikte spatels kunnen als ongevaarlijke producten worden beschouwd en volgens dit criterium worden verwijderd.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW















CYTOLOGIEBORSTEL

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product kan infecties veroorzaken. Steriel door ethyleenoxide.

Het beoogde gebruik van dit product is het verzamelen van endocervicale monsters voor laboratoriumonderzoek (cytologisch, anatomo-pathologisch, microbiologisch, enz.). De vorm en textuur van de kop zorgen voor een nauwkeurige monsterafname zonder de mucus te beschadigen. Met het borsteltje kan de gebruiker een monster met voldoende hoeveelheid nemen in geval van meerdere tests. Het beoogde gebruik van dit product is het verzamelen van baarmoederhalsmonsters door gespecialiseerde gezondheidswerkers en onder geschikte hygiënische omstandigheden. Niet gebruiken in geval van zwangerschap. Presentatie: eenheidsverpakking met 1 stuks in peel-pack.

De cytologieborstel is bedoeld voor gebruik in klinische en ziekenhuisomgevingen. Het gebruik van de cytologieborstel levert geen moeilijkheden op voor de beoogde eindgebruikers. Niet geschikt voor andere toepassingen dan die voor het beoogd gebruik. Niet gebruiken bij tekenen van breuk of beschadiging van de verpakking. Gebruik het product niet als de eenheidsverpakking beschadigd lijkt te zijn, omdat het mogelijk niet meer steriel is. Niet gebruiken als er vuil op de borstel wordt waargenomen. Gooi het product weg als u een kapotte borstel of een borstel zonder kop aantreft. Niet gebruiken als de afgedrukte productinformatie niet correct wordt weergegeven. Niet gebruiken na de vervaldatum. Tijdens het gebruik mag er geen sterke druk op worden uitgeoefend omdat anders de cytologieborstel kan breken (wat vrij onwaarschijnlijk is omdat er een aanzienlijk kracht nodig is om de borstel te breken). Als deze gebroken is, gooi hem dan onmiddellijk weg. Voor de cytologieborstel gelden geen speciale bewaarcondities. Gezien het beoogde gebruik van het product zijn de eindgebruikers gezondheidswerkers die beschikken over speciale bakken voor biologisch afval. Het gebruikte product moet hierin worden weggegooid voor behandeling als biologisch afval. Het is de verantwoordelijkheid van ieder laboratorium om het afval volgens de voorschriften te behandelen en af te voeren. Ongebruikte borstels kunnen als ongevaarlijke producten worden beschouwd en volgens dit criterium worden verwijderd.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

 Aantal	 CE-markering	 Partijcode	 Fabrikant
 Catalogusnummer	 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	 Niet opnieuw gebruiken	 Steriel door ethyleenoxide
 Medisch hulpmiddel	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de website www.deltalab.es/eifus	 Fabricagedatum	 Houdbaarheidsdatum
 Unieke identificatie van het hulpmiddel	 Enkelvoudig steriel barrièresysteem		

In geval van een ernstig incident* dat verband houdt met het product, Deltalab, S.L. alsook de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd hiervan in kennis stellen. *Onder een "ernstig incident" wordt verstaan een incident dat de dood of een ernstige verslechtering van de gezondheid van de patiënt of de gebruiker tot gevolg heeft of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt.