



ESPÁTULA DE AYRE

Produto de uso único. A reutilização deste produto pode causar infecções. Esterilizado por óxido de etileno. Comercializada em 2 materiais:

- Madeira de consistência inquebrável e bordos redondos para evitar as agressões sobre as mucosas e tecidos.
- Plástico (polipropileno) atóxico, com bordos redondos para evitar as agressões sobre as mucosas e tecidos.

Tem uma consistência mecânica suficiente para assegurar a impossibilidade de quebra durante o seu uso. Produto destinado a facilitar a colheita de amostras cervicais por profissionais de saúde especializados nas condições de higiene apropriadas. Apresentação unitária: embaladas unitariamente em flow-pack ou peel-pack.

A espátula é destinada a ser utilizada em ambientes clínico-hospitalares. O uso da espátula não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos. Não está apta a qualquer outra aplicação que não seja o uso previsto. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. Caso a embalagem tenha perdido a sua integridade, não utilizar a espátula visto que poderá ter perdido a sua condição de esterilidade. Não usar se houver sujidade na espátula. Descarte o produto caso este esteja partido ou com lascas. Não utilizar se as informações impressas sobre o produto não forem apresentadas corretamente. Não utilizar após o prazo de validade.

Não se deve exercer uma pressão forte durante a utilização, visto que a espátula poderia partir-se (pouco provável, pois é necessária uma força considerável para a espátula partir). Em caso de quebra, descartar imediatamente. As espátulas não necessitam de condições especiais de conservação. Devido ao uso previsto do produto, os destinatários pertencem ao sector da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos onde se deve descartar o produto utilizado e gerido como resíduo biológico. As espátulas, uma vez usadas, devem ser descontaminadas ou tratadas como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manipular, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regulamentações. As espátulas não utilizadas podem-se considerar produtos não perigosos e podem eliminar-se segundo esse critério.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW

ESCOVILHÃO CERVICAL

Produto de uso único. A reutilização deste produto pode causar infecções. Esterilizado por óxido de etileno.

É utilizado para a recolha de amostras endocervicais destinadas a estudos de laboratório (citológicos, anatomopatológicos, microbiológicos, etc) A forma e a textura da cabeça permitem colher uma quantidade de amostra suficiente caso se tenha que realizar-se mais que uma prova. Produto destinado a facilitar a recolha de amostras cervicais por profissionais de saúde especializados nas condições de higiene apropriadas. Não deve ser utilizado em caso de gravidez. Apresentação unitária: embalados unitariamente em peel-pack.

O escovilhão é destinado a ser utilizado em ambientes clínico-hospitalares. O uso do escovilhão não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos. Não está apta a qualquer outra aplicação que não seja o uso previsto. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. Caso a embalagem tenha perdido a sua integridade, não utilizar o escovilhão visto que poderá ter perdido a sua condição de esterilidade. Não usar se houver sujidade no escovilhão. Descarte o produto caso este esteja partido ou incompleto. Não utilizar se as informações impressas sobre o produto não forem apresentadas corretamente. Não utilizar após o prazo de validade.

Não se deve exercer uma pressão forte durante a utilização, visto que o escovilhão poderia partir-se (pouco provável, pois é necessária uma força considerável para o escovilhão partir). Em caso de quebra, descartar imediatamente. Os escovilhões não necessitam de condições especiais de conservação. Devido ao uso previsto do produto, os destinatários pertencem ao sector da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos onde se deve descartar o produto utilizado, e gerido como lixo biológico. Os escovilhões, uma vez usados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manipular, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regulamentações. Os escovilhões não utilizados podem-se considerar produtos não perigosos e podem eliminar-se segundo esse critério.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

QTY Quantia	CE 0318 Marcação CE	LOT Código do lote	Fabricante
REF Número de catálogo	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Não reutilizar	STERILE EO Estéril por óxido de etileno
MD Aparelho médico	Consultar as instruções de utilização no website www.deltalab.es/eifus	Data de fabricação	Prazo de validade
UDI Identificador de dispositivo exclusivo	Sistema exclusivo de barreira estéril		

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.

