

CUÑA Y BOTELLA MASCULINA PARA ORINA

Para la recogida de fluidos biológicos humanos (heces y orina). Limpiar y desinfectar antes de su uso. Sin esterilizar.
El producto no está fabricado con látex de goma natural o goma natural seca.
Producto sanitario.












Finalidad prevista:

La cuña tiene la finalidad de recoger la orina y/o heces en pacientes encamados o con movilidad reducida. La botella masculina tiene la finalidad de recoger la orina en pacientes varones encamados. Tanto la cuña como la botella están destinadas al uso hospitalario y/o domiciliario.

Precauciones generales:

1. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto.
2. El uso de la cuña y la botella masculina no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos.
3. En el caso de rotura del envase no utilizar la cuña o la botella masculina.
4. Limpiar con detergente y desinfectar con lejía u otros desinfectantes, antes de cada uso. La cuña es apta para su uso en lavadoras desinfectadoras.
5. La vida útil viene determinada por el desgaste y deterioro debidos al uso. Desechar cuando se detecten cambios de color, asperezas, deformaciones, etc.
6. Almacenar lejos de fuentes de calor.

Glosario de símbolos:

 REF	Número de catálogo	 LOT	Número de lote		Fecha de caducidad
 MD	Producto Sanitario	 QTY	Cantidad		Marcado CE
	Manténgase fuera de la luz del sol		Fabricante		No utilizar si el envase está dañado
 UDI	Identificador único de dispositivo		Consulte las instrucciones de uso en www.deltalab.es		

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.