

est

## TSÜTOLOGIAHARI

**Toode, mida kasutatakse selleks, et hõlbustada emakakaela proovide võtmist spetsialiseerunud tervishoiutöötajate poolt ja sobivates hügieenitingimustes, mis on ette nähtud laboriuuringuteks (tsütoloogilised, patoloogilised, mikrobioloogilised jne). Ühekordselt kasutatav toode. Emakakaela harjad on meditsiiniseadmed (MD).**

### Kavandatud eesmärk:

Toode, mis on ette nähtud emakakaela biopsia võtmiseks kahtlasest piirkonnast või tupeuuringu käigus avastatud nähtavate eksotservikaalsete kahjustustega, et saada kudesid intraepiteliaalse haigusega naiselt.

Mõeldud kasutamiseks kliinilistes haiglates.

Pea kuju ja tekstuur võimaldavad võtta piisava koguse proovi juhul, kui on vaja teha rohkem kui üks katse.

### Esitlus:

Esitlus hulgi.

### Üldised ettevaatusabinõud:

1. Seda ei tohi kasutada raseduse korral.
2. Selle toote korduvkasutamine võib põhjustada infektsiooni.
3. Emakakaela harja kasutamine ei tekita selle kavandatud kasutusel raskusi.
4. Ei sobi muuks otstarbeks peale ettenähtud kasutuse.
5. Ei tohi kasutada, kui harjal on märgata mustust. Visake toode ära, kui see on katki või ilma peata.
6. Kasutamise ajal ei tohi avaldada tugevat survet, kuna emakakaela hari võib puruneda (ebatõenäoline, kuna selle purustamiseks vajalik jõud on märkimisväärne). Purunemise korral visake see kohe ära.
7. Emakakaela harjad ei vaja säilitamisel eritingimusi.
8. Toote sihipärase kasutusest tulenevalt kuuluvad vastuvõtjad tervisesektorisse, omavad bioloogiliste jäätmete konteinereid, kuhu tuleb kasutatud toode ära visata ning käidelda bioloogiliste jäätmetena. Pärast kasutamist tuleb emakakaela harjad saastest puhastada või neid käsitleda saastunud haiglajäätmetena. Iga labor vastutab jäätmete käitlemise, töötlemise ja kõrvaldamise eest vastavalt eeskirjadele. Kasutamata pintsleid võib pidada mitteohtlikeks toodeteks ja neid võib vastavalt sellele kriteeriumile kõrvaldada.



Ühekordseks kasutamiseks



CE märgistus



Tootja



Meditsiiniseade



deltalab.es/eifus

Tutvuda veebilehel avaldatud kasutusjuhendiga [www.deltalab.es/eifus](http://www.deltalab.es/eifus)



Aegumiskuupäev



Katalooginumber



Seadme kordumatu identifikaator



Partiinumber

Tootega seotud tõsise intsidendi\* korral teavitage mõlemat Deltalab, S.L. samuti selle riigi pädev asutus, kus kasutaja on asutatud. \*Tõsine intsident on juhtum, mis toob kaasa patsiendi või kasutaja surma või tervise tõsise halvenemise või tõsise ohu rahvatervisele.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)