

es

CEPILLO CERVICAL

Producto utilizado para facilitar la toma de muestras cervicales por personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas, destinadas a estudios de laboratorio (citológicos, anatomopatológicos, microbiológicos, etc.).
Producto de un solo uso. Los cepillos cervicales son productos sanitarios (MD).

Finalidad prevista:

Producto destinado para la obtención de una biopsia cervical de un área sospechosa o con lesiones visibles exocervicales detectadas durante un examen vaginal, con el fin de obtener un tejido de una mujer con enfermedad intraepitelial.

Destinado a ser utilizado en entornos clínicos-hospitalarios.


La forma y la textura de la cabeza permiten tomar una cantidad de muestra suficiente en caso de tener que realizar más de una prueba.

Presentación:

Presentación a granel.

Precauciones generales:

1. No debe ser utilizado en caso de embarazo.
2. La reutilización de este producto puede causar infecciones.
3. El uso del cepillo cervical no presenta ninguna dificultad para los usos previstos.
4. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto.
5. No debe usarse si se observa suciedad en el cepillo. Desechar el producto si se encuentra alguno roto o sin cabeza.
6. No debe ejercerse una fuerte presión durante el uso, ya que el cepillo cervical podría romperse (poco probable ya que la fuerza necesaria para romperlo es considerable). En caso de rotura, desechar inmediatamente.
7. Los cepillos cervicales no precisan condiciones especiales de conservación.
8. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario, y disponen de contenedores de residuos biológicos, donde se debe desechar el producto utilizado, y gestionarlo como desecho biológico. Los cepillos cervicales, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las reglamentaciones. Los cepillos no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.

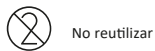

No reutilizar



Marcado CE



Fabricante



Producto Sanitario



deltalab.es/eifus

Consultar instrucciones de uso en la página web www.deltalab.es/eifus



Fecha de caducidad



Referencia de catálogo



Identificador único de dispositivo



Número de lote

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.



DELTA LAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es