

it

## SPAZZOLA CERVICALE

**Prodotto utilizzato per facilitare il prelievo di campioni cervicali da parte di personale sanitario specializzato e in adeguate condizioni igieniche, destinato a studi di laboratorio (citologici, patologici, microbiologici, ecc.).**  
**Prodotto monouso. Gli spazzolini cervicali sono dispositivi medici (MD).**

### Scopo previsto:

Prodotto destinato all'ottenimento di una biopsia cervicale di un'area sospetta o con lesioni escervicali visibili rilevate durante un esame vaginale, al fine di ottenere tessuto da una donna con malattia intraepiteliale.

Destinato all'uso in ambito clinico-ospedaliero.

La forma e la consistenza della testa consentono di prelevare una quantità sufficiente di campione nel caso in cui sia necessario eseguire più di un test.

### Presentazione:

Presentazione alla rinfusa.

### Precauzioni generali:

1. Non deve essere usato in caso di gravidanza.
2. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni.
3. L'uso dello spazzolino cervicale non presenta alcuna difficoltà per gli usi previsti.
4. Non adatto per qualsiasi applicazione diversa dall'uso previsto.
5. Non deve essere utilizzato se si osserva sporcizia sulla spazzola. Scartare il prodotto se risulta rotto o senza testa.
6. Non esercitare una forte pressione durante l'uso, in quanto lo spazzolino cervicale potrebbe rompersi (poco probabile in quanto la forza necessaria per romperlo è considerevole). In caso di rottura, scartare immediatamente.
7. Le spazzole cervicali non richiedono particolari condizioni di conservazione.
8. A causa della destinazione d'uso del prodotto, i destinatari appartengono al settore sanitario e dispongono di contenitori per rifiuti biologici, dove il prodotto utilizzato deve essere smaltito e gestito come rifiuto biologico. Gli spazzolini cervicali, una volta utilizzati, devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ciascun laboratorio gestire, trattare e smaltire i rifiuti secondo le normative. Le spazzole non utilizzate possono essere considerate prodotti non pericolosi e possono essere smaltite secondo questo criterio.



Non riutilizzare



Marcato CE



Fabbricante



Dispositivi medici



[deltalab.es/eifus](http://deltalab.es/eifus)

Consultare le istruzioni per l'uso sul sito Web [www.deltalab.es/eifus](http://www.deltalab.es/eifus)



Data di scadenza



Numero di catalogo



Identificatore univoco del dispositivo



Codice di lotto

In caso di incidente grave\* relativo al prodotto, avisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. \*Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.



DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com) - [www.deltalab.es](http://www.deltalab.es)