

MEDIOS DE ENRIQUECIMIENTO

TIOLICOLATO

Medio de enriquecimiento de uso general utilizado para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos aerobios, anaerobios y exigentes. Se utiliza como medio de enriquecimiento para muestras clínicas. Producto de un solo uso. Presentación en tubo de 5 ml conteniendo 2 ml de medio.

SELENITO

Medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de *Salmonella spp.* y algunas especies de *Shigella*, a partir de muestras fecales, orina, alimentos y/o agua. Inhibe la proliferación de la microbiota intestinal. Se utiliza como medio de enriquecimiento para muestras clínicas y de uso industrial. Producto de un solo uso. Presentación en tubo de 5 ml conteniendo 2 ml de medio. La presencia ocasional de un cierto sedimento anaranjado y/o de ligeras variaciones de coloración no influyen negativamente en la funcionalidad del medio.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS MEDIOS

Se aconseja conservar los medios de enriquecimiento en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a una temperatura entre 2-30°C. Al recibir los tubos con las muestras, almacenar en lugar fresco y oscuro.

PRECAUCIONES

Producto estéril dosificado en condiciones asépticas. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe usarse si hay signos de rotura o deterioro del envase. No utilizar si se observa alteración en el medio de enriquecimiento. Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario, y disponen de contenedores de residuos biológicos, donde se debe desechar el producto utilizado, y gestionarlo como desecho biológico. Los tubos con medio, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las reglamentaciones.

Glosario de símbolos:

QTY	Cantidad	CE	Marcado CE	Manténgase fuera de la luz del sol	LOT	Número de lote	2°C - 30°C	Temperatura almacenamiento
REF	Número de catálogo	No utilizar si el envase está dañado	Fabricante	No reutilizar	STERILE A	Estéril por técnica aséptica		
Fecha de caducidad	Consulte las instrucciones de uso en www.deltalab.es/eifus	IVD		Producto Sanitario para Diagnóstico in vitro				

es En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.

